

# Blefarene BABY

## 30 salviette per la detersione perioculare

Blefarene Baby è una morbida salvietta monouso, in cotone, che per i suoi componenti è in grado di fornire un'attività umettante e detergente delle palpebre e delle ciglia.

**Composizione:** aqua, lauryl glucoside, propylene glycol, polyglyceryl-2 di-polyhydroxystearate, sodium phosphate, 1,2-hexanediol, tochopheryl acetate, oleyl alcohol, zanthoxylum bungeanum fruit extract, chamomilla recutita extract, centaurea cyanus flower extract, glycerin, disodium phosphate, disodium EDTA, hydroxyacetophenone, citric acid.


**Destinazione d'Uso:** Blefarene Baby è indicata per un'accurata detersione quotidiana della delicata zona perioculare. L'impiego di Blefarene Baby risulta particolarmente valido anche nei casi di arrossamento del bordo palpebrale grazie alla sua azione lenitiva.

### Modalità d'uso:

**Detersione quotidiana degli occhi:** Con mani ben pulite, aprire la bustina ed estrarre la salvietta. Dispiegare completamente la salvietta e passarla delicatamente sul bordo palpebrale e sulle ciglia mantenendo l'occhio chiuso.


**In caso di secrezioni difficili** da rimuovere, di stati infiammatori del bordo palpebrale (congiuntiviti, blefarocongiuntiviti, orzaioli) e **occlusioni del canale lacrimale**, è preferibile effettuare degli impacchi caldo umidi nella zona interessata.

A tale scopo scaldare la bustina immergendola ancora sigillata per 3-5 minuti in acqua tiepida (40°C). Dopo averla riscaldata, aprire la bustina, estrarre la salvietta e mantenendola piegata massaggiare delicatamente la zona interessata per 1-2 minuti mantenendo l'occhio chiuso.

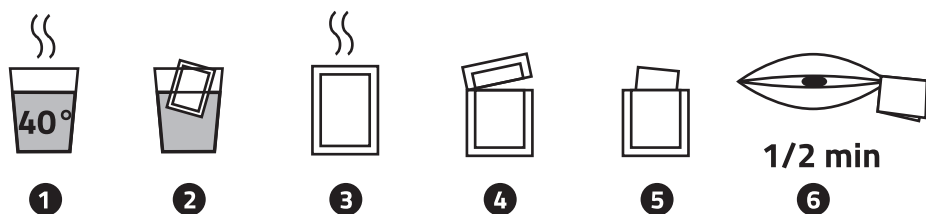

In caso di prurito o gonfiore delle palpebre è consigliabile eseguire degli impacchi freddi nella zona interessata per ottenere un effetto decongestionante.

A tale scopo raffreddare la bustina in frigorifero almeno per 1 ora. Aprire la bustina ed applicare la salvietta mantenendola piegata nella zona interessata per 1-2 minuti, avendo cura di mantenere l'occhio chiuso.

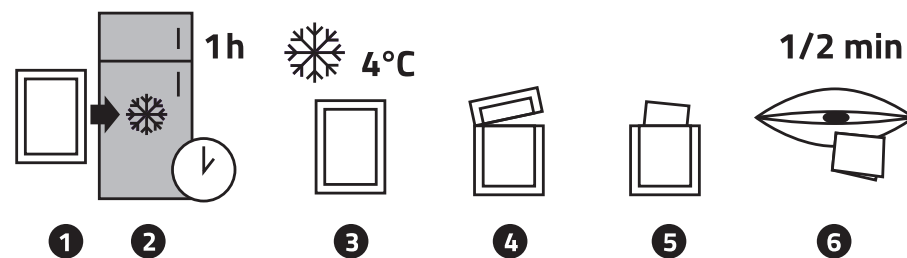

**Avvertenze/Precauzioni:** Si consiglia di lavarsi bene le mani prima dell'uso. Monouso. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla polvere. Leggere le istruzioni per l'uso. Sospendere in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto, consultando il proprio medico qualora i sintomi persistessero. Seguire attentamente le istruzioni del Medico oculista, in caso di stati infettivi non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. In caso di riutilizzo può essere veicolo di infezioni. La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantiti esclusivamente dall'integrità della confezione. Non utilizzare in caso di una nota incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. In caso di impacchi caldi o freddi utilizzare la salvietta seguendo le modalità d'uso. La salvietta una volta scaldata va utilizzata per l'impacco entro pochi minuti oppure deve essere gettata. Conservare al di sotto dei 25°C. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non utilizzare in caso di bustina non integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

USO ESTERNO - NON RISCIAQUARE DOPO L'USO  
TESTATO SOTTO CONTROLLO PEDIATRICO

JUNIAPHARMA

Junia Pharma S.r.l. Via delle Lenze, 216/b  
56122 Pisa Tel. 050.7846500  
info@juniapharma.it - www.juniapharma.it

